

グリコヘモグロビン分析装置

ADAMS A1c

アダムス A1c HA-8190V | HbA1c



HbA1c検査のNew Standard

24秒/検体のFast modeで臨床への早期報告を実現、
変異ヘモグロビン(HbS、HbC)を分離可能なVariant mode(58秒/検体)搭載。
ルーチン測定でも多様な検体測定を実現しました。


アークレイは糖尿病ケア製品を通じて、公益社団法人日本糖尿病協会の賛助会員として、ブルーサークル運動（啓発運動）に協賛しています。

11月14日は「世界糖尿病デー」。1991年に国際糖尿病連合(IDF)と世界保健機関(WHO)が制定した、糖尿病の疾患啓発の日です。「ブルーサークル」は、どこまでも続く空を表す「ブルー」と団結を表す「輪」からデザインされた世界糖尿病デーのシンボルマークです。


アークレイは糖尿病検査のパイオニアメーカーとして、この「ブルーサークル」と共に、これからも糖尿病診療の発展に貢献していきます。



world diabetes day
14 November

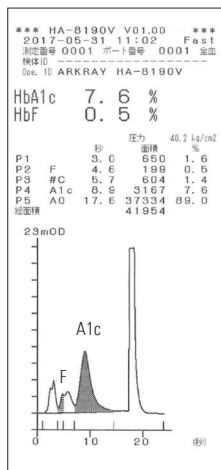

Fast mode

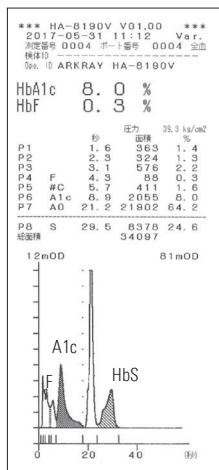

Variant mode



バーコード読み取り機能の性能向上

従来はバーコードの向きをそろえて採血管をセットする必要がありました。HA-8190Vでは自動で採血管を回転させながらバーコードを読み取ることが可能となり、整列作業が不要になります。

タッチパネルで操作性向上

操作パネルに7インチのタッチパネル付カラーLCDを採用しました。カラーで見やすく、直感的な操作ができるため操作性が向上しました。

印字例

高精度な測定結果

HA-8190V は測定原理に HPLC 法を採用しているため、高精度な測定結果を得ることができます。

HbF補正機能

HbA1c値の算出に影響を及ぼすHbF値が高値となった場合に、自動補正することが可能です。変異Hb含有検体だけでなく、新生児や貧血治療中の方の検体でもHbF高値を示すことがあるため、これらの検体について自動補正して参考HbA1c値を算出します。

仕 様	
測定対象	全血または溶血検体
測定項目	HbA1c(ステイブルHbA1c)、HbF (Variant modeではHbS、HbCを分離、およびHbD、HbEの検出が可能)
検体使用量	約8 μ L(全血)
処理速度	Fast mode :24秒/検体 Variant mode :58秒/検体
必要検体量	採血管 :採血管の下端から10mm以上 サンプルカップ :400 μ L以上
外形寸法	530(幅)×530(奥行)×530(高さ)mm(溶血・洗浄液ボトルを含めない)
重量	本体 :約41kg サンプラーユニット :約4kg
届出番号	25B1X00001000055
分類	クラスI(一般医療機器)/特定保守管理医療機器

※本商品は積水メディカル株式会社との共同開発品です。

検査データ管理システム


MEQNET MINILAB

メックネット ミニラボ(ADAMS)



メックネット ミニラボでより効率的な運用を

メックネット ミニラボは、LIS からの検査オーダー・患者情報の受け取り、測定モードの指示をはじめ、クロマトグラムの保存・管理や詳細なロジック設定を行うことが可能で、1 台で検査状況を把握できるため効率的な運用が実現できます。

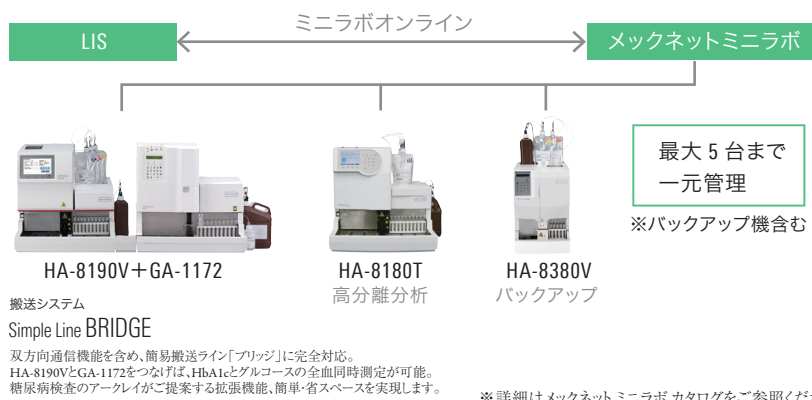

HA-8190V+GA-1172

搬送システム
Simple Line BRIDGE

双方向通信機能を含め、簡易搬送ライン「ブリッジ」に完全対応。
HA-8190VとGA-1172をつなげば、HbA1cとグルコースの全血同時測定が可能。
糖尿病検査のアーケイがご提案する拡張機能、簡単・省スペースを実現します。

HA-8180T
高分離分析

HA-8380V
バックアップ

※詳細はメックネット ミニラボ カタログをご参照ください。

発売元 **アークレイ株式会社**
製造販売元 **株式会社アークレイ ファクトリー**
販売元 **アークレイ マーケティング株式会社**
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-20-20大雅ビル5F
TEL 050-5527-7700(代)
URL <http://www.arkray.co.jp/>

お問い合わせ先

担当

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。