

尿沈渣分析装置

# AUTION EYE

オーション アイ AI-4510 | 尿中有形成分



## Solution to Your Needs

尿沈渣検査の心強いパートナーとして

### ユーザーフレンドリー

見やすいオペレーション画面で直感的な操作が可能

### 多彩な機能


尿沈渣検査をサポートする  
さまざまな情報を提供

### コンパクト

最小クラス※の設置面積を実現 ※当社従来比

## 尿中有形成分分析の自動化により、新たな時間をご提供します

AUTION EYE が撮影した成分を、独自のアルゴリズムに基づいて自動的に分類します。また必要に応じて AUTION EYE が撮影した画像を確認できるため、画像を確認してご自身で分類することも可能です。これらの操作で尿中有形成分分析を自動化することで、「鏡検が本当に必要な検体」の尿沈渣検査に注力いただけます。

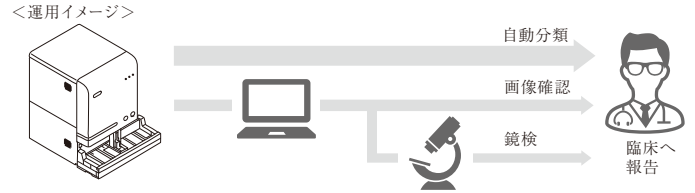


## 直感的に操作可能なオペレーション画面に多彩な機能を搭載

測定結果を確認するオペレーション画面は、見やすい画面構成で直感的に操作が可能なデザインです。さらにAUTION EYEが撮影した成分を、判別しやすくするためのサポート機能を多数搭載しています。

### 成分画像を判別しやすくするために

AUTION EYE では測定時にカラーで画像を撮影しています。オペレーション画面で画像確認する際に、有形成分の色味の違いまで確認可能です。また、複数成分を1画面に表示する画面(サマリー画面)もあり、各成分の出現頻度を感覚的に把握しやすくなっています。


#### 成分画像の例

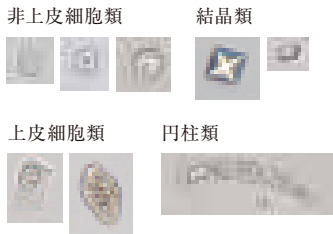

#### サマリー画面 (一部)



#### 本製品の画面の例

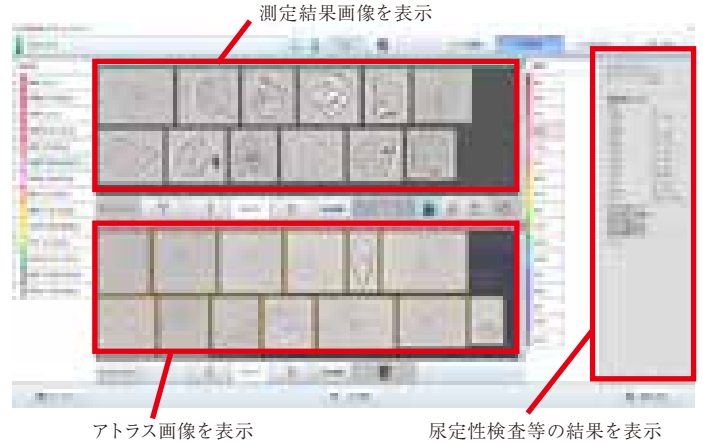

### 便利なアトラス画像を標準搭載


標準的な成分画像を集めたアトラス画像集を搭載し、測定結果画像と同じ画面内に表示することも可能です。さらにユーザー独自の画像を追加でき、成分判定の標準化や施設内の教育用ツールとして活用も可能です。

### 尿定性検査の結果も併せて表示

尿定性検査の結果も、AUTION EYE の測定結果と併せて、オペレーション画面内に表示できます。これにより定性検査の結果を参照しながら、AUTION EYE の結果確認をすることができます。

## 簡易搬送でコンパクトな設置面積を実現

尿定性検査機器と直接接続ができ、搬送においても最小クラス\*のコンパクトな設置面積を実現しました。 ※当社従来比

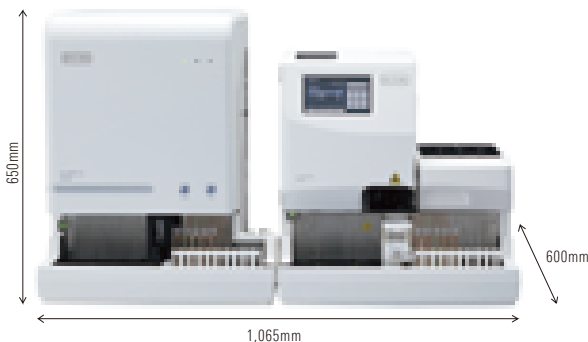

仕様	
測定対象	尿
測定項目 (自動分類項目)	赤血球、白血球、白血球塊、扁平上皮細胞、 非扁平上皮細胞、硝子円柱、その他円柱、細菌(桿菌) 酵母、粘液糸、精子、結晶
必要検体量	2mL 以上
外形寸法	530(幅)×600(奥行)×650(高さ)mm (サンプラーユニット含む)
重量	57kg(サンプラーユニット含む)
届出番号	25B1X00001000058
分類	クラスI (一般医療機器) / 特定保守管理医療機器
JANコード	49 87486 02719 5

発売元      **アークレイ株式会社**  
製造販売元 **株式会社アークレイ ファクトリー**  
販売元      **アークレイ マーケティング株式会社**  
〒160-0004  
東京都新宿区四谷1-20-20大雅ビル4F  
TEL 050-5527-7700(代)  
URL <http://www.arkray.co.jp/>

お問い合わせ先

担当

\*外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。