

多様な採血現場に合わせ
カスタマイズが可能です

必要なものは手の届く範囲に設置し
安全かつ効率的な作業環境を提供
モニター / 採血情報端末用の支柱は
レコーダーカメラなどのオプションの
設置も可能です



- ・設置スペースの事前検証が必要となります
- ・上位システムとの接続における確認協議が必要となります
- ・LAN工事ならびに電源工事、取付設置工事 等が必要となります
- ・運用、設置 等に於いて、ご施設関係者への案内周知が必要となります
- ・旧ソフト(アシストソリューション)と画面レイアウト、操作感 等同一でない部分があります
- ・旧ソフト(アシストソリューション)と同一にするカスタマイズは、基本的に困難な部分があります
- ・特殊カスタマイズの際、対応制限が生じる場合があります

※外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

●ご使用前に
必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、
時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、
お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

製造販売業者／販売業者

TMC 株式会社テクノメディカ 本社 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
URL <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp


名古屋支店 〒464-0850 名古屋市中区今池5-4-3 6F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517	北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 11F(C2) TEL(06)6393-3800 FAX(06)6393-3801	甲信越営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017
福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334	広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町2-6-5 6F TEL(082)961-3670 FAX(082)961-3671
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760	松山営業所 〒790-0056 松山市土居町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334	

2021.10 - 1000



採血業務支援システム

Assist More

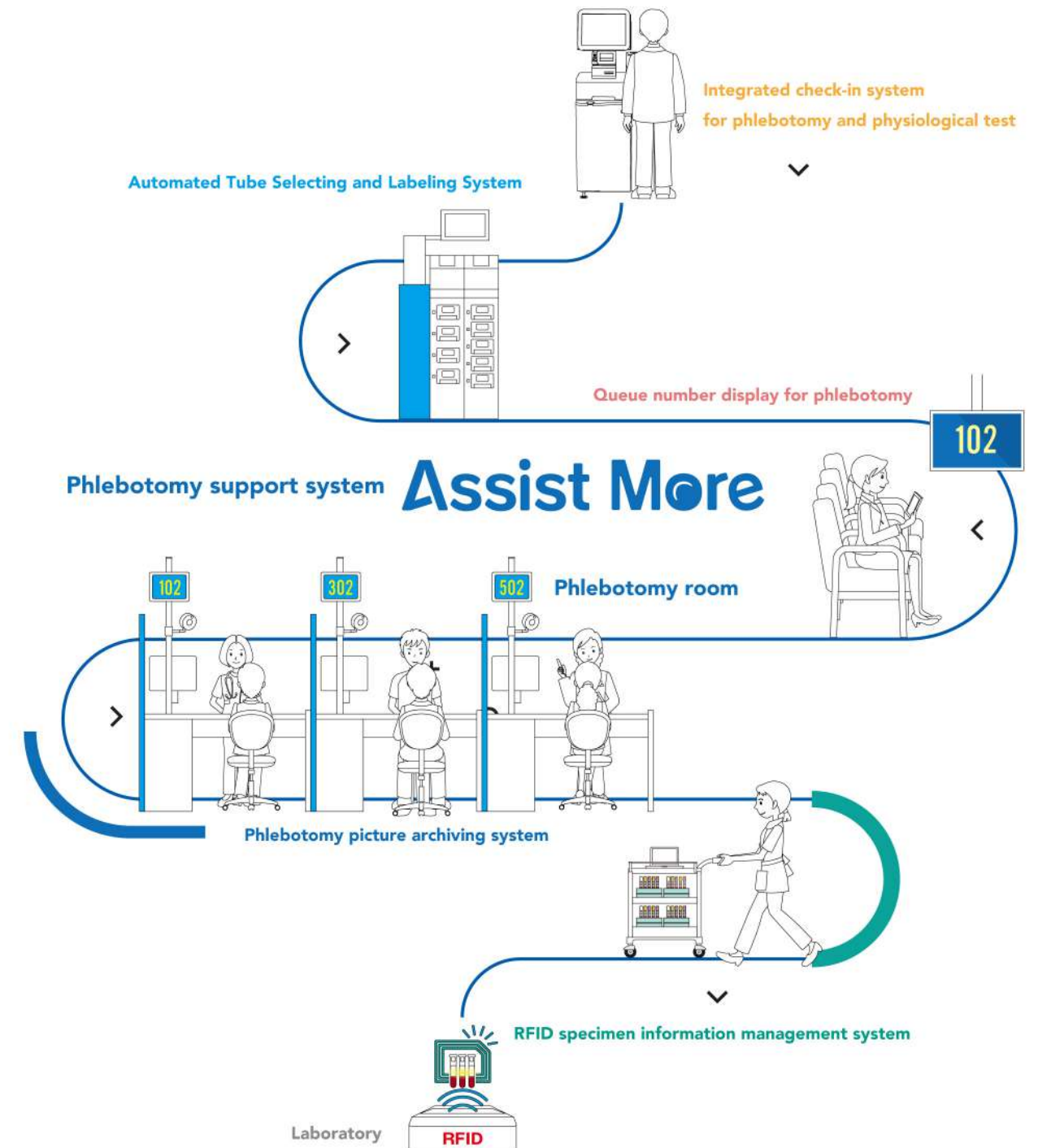




テクノメディカの 採血業務アシストソリューション

採血業務における受付から採血管準備／患者呼出／採血業務支援／患者照合等あらゆるシーンで安全性と効率化を実現する人に優しいシステムです
豊富なオプションと拡張性を備え ご施設に合わせたカスタマイズが可能です
最適なソリューションの組合わせで理想の採血環境を実現いたします

Assist Solutions for Blood Collection ご施設に合わせた「理想の採血環境」をご提案いたします

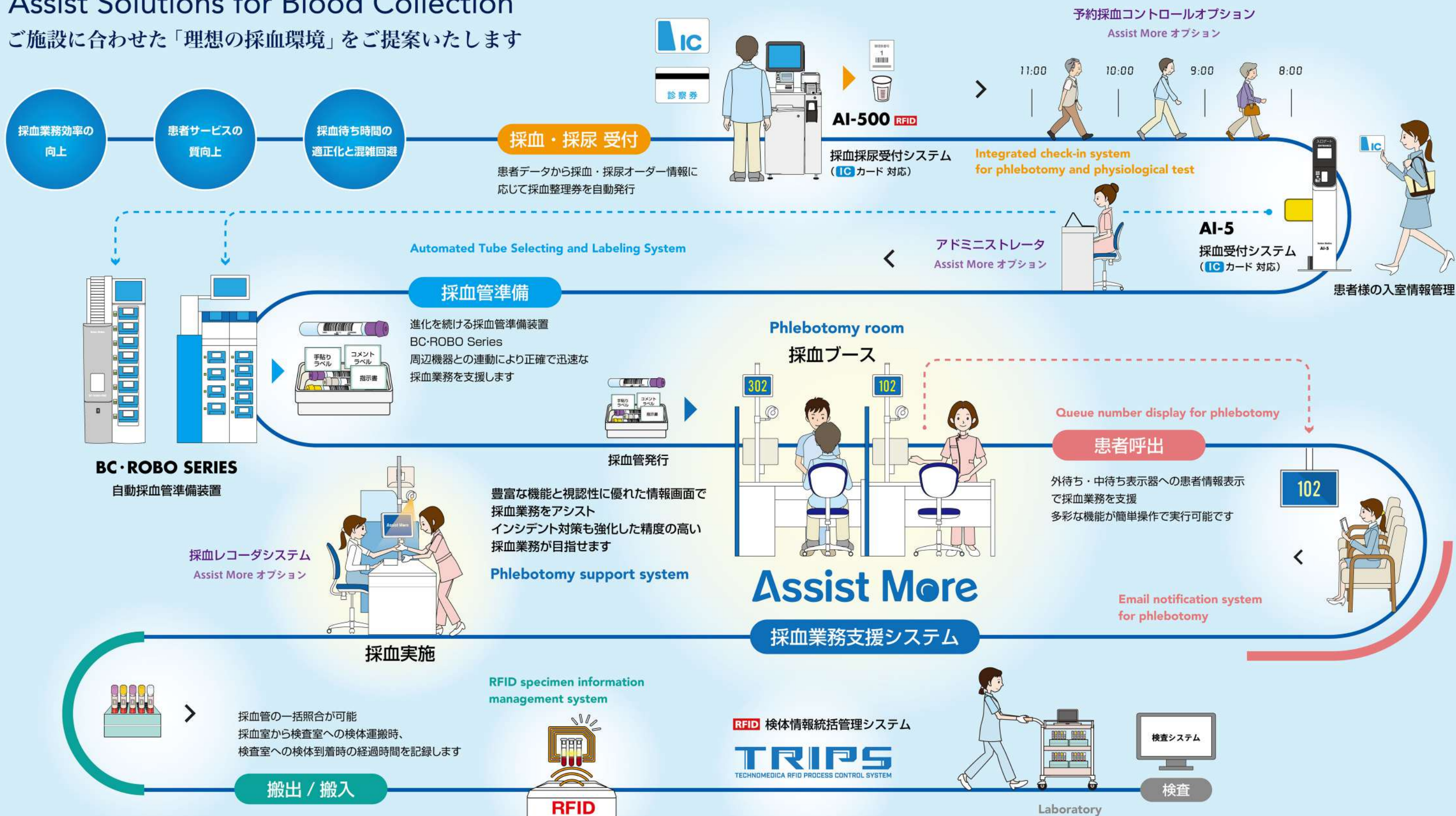

採血業務の様々なシーンに合わせた画面機能で 必要な情報をリアルタイムに提供

採血台 情報端末の操作で患者情報の確認や様々な登録ができる充実した画面機能

メイン機能画面の流れ

ログイン

呼出待機

採血管照合



呼出操作をしてください

呼出番号	患者氏名	年齢	性別	採血部位	採血時間	採血回数	採血回数
1	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
2	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
3	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
4	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
5	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
6	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
7	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1

患者の車いす・コメント情報や容器情報など
採血前に必要な患者情報の確認が可能
患者様とのファーストコンタクトに有効です

採血管発行



採血管照合をして下さい。

患者ID	患者氏名	年齢	性別	採血部位	採血時間	採血回数	採血回数
00000002	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000003	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000004	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000005	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000006	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000007	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000008	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1

手貼りラベル貼り付けの採血管指示など、
取り違えを防ぎます



カルテ登録

採血場所を選択して下さい。

患者ID	患者氏名	年齢	性別	採血部位	採血時間	採血回数	採血回数
00000002	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000003	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000004	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000005	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000006	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000007	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000008	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1

採血後画面タッチで患者情報を簡単入力
採血カルテは視認性の高いピクトグラムを多用し登録も簡単
患者様の詳しい採血情報も共有できます

採血終了



患者照合

整理券を渡して下さい。

患者ID	患者氏名	年齢	性別	採血部位	採血時間	採血回数	採血回数
00000002	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000003	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000004	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000005	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000006	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000007	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000008	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1

患者属性情報・採血コメント情報・履歴情報・
患者照合状況・採血情報注意ピクトグラム・
直近の部位画像も表示されます

中待ち
番号呼出し

102



採血者履歴でセルフチェック

採血者履歴

患者ID	患者氏名	年齢	性別	採血部位	採血時間	採血回数	採血回数
00000002	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000003	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000004	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000005	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000006	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000007	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1
00000008	山田 太郎	34	男性	左手	14:38	1	1

平均採血時間・平均採血患者数・平均ログイン時間・
採血サイクル等の採血実績情報の蓄積と確認ができます

採血で担当で自身の採血記録業務内容を確認することができますので
一人一人が過去の記録と比較しご自身のデータ分析が可能となり、
これまで以上に安全で質の高い採血業務をご提供いただけます

採血詳細ログ保存 / 抽出機能

採血実施記録を細かく保存し
取り出し追跡も可能

採血者履歴画面

外待ち画面表示 (オプション)

検査の都合上、採血の順番が前後することが
外来採血受付
只今の採血
162
番までの方、
お呼びしております。
108
101
162
下記の番号の方は係員にお申し出ください。
10

大型ディスプレイ
外待ち表示(例)

表示/レイアウトの
カスタマイズが
可能です

- 採血待合案内を表示します
- 自動計算した待ち時間の表示 / 音声設定が可能
- 専用ソフト Edios で独自の画面レイアウトが可能
搭載機能例：保留設定 / テロップ / 固定コメント / カラー変更 等

WEB 採血待合 (オプション)

待ち時間超過しています
10分
待ち人数
50人
現在時刻
05:13
ログイン採血者
不足しています
7人/7台
呼び出し受付番号
50番
最終受付番号
50番

採血室
モニタリング(例)

パネルのクリックで
さらに詳細な情報が
閲覧可能です

- 採血情報の検索や採血室モニタリングシステムによる
リアルタイムな状況確認が可能
- WEB アプリケーションを用いた院内の様々な場所からの
採血情報共有を実現 (診察室 / 受付 / 検査室 / 採血室 他)
- 搭載機能例：患者検索 / 患者詳細 / 採血室モニタリング機能 等

グラフィカルな画面情報で視覚的に認識

採血状況に応じユーザーエクスペリエンス (UX) を高めるグラフィカルな画面
ピクトグラムやイラスト、写真による表示で視認性を大幅に高めます
必要な情報を瞬時に確認できます

患者照合画面 (例)

整理番号: 2
患者番号: 0000002
性別: 男性
54才
テノ シュウヘイ
テクノ 修平

直感的な注意喚起
ピクトグラム

わかりやすい
採血部位イラスト

採血カルテに
登録された注意情報が
グラフィカルに
反映されます

採血業務の
流れ

患者様の
細やかな情報

タッチ操作をサポートする
ボタンデザイン

豊富な機能と UX を高める画面で採血業務をアシスト

表示はピクトグラムや写真を多用し見やすくタッチ画面式で簡単操作
詳細なデータを表示や記憶でき効率的で安全な採血業務サービスが提供できます

採血カルテ 患者様も安心の細やかな採血記録

患者様の必須情報はもちろん、採血部位詳細記録、穿刺用具情報などを細かく記録
患者様一人一人に合わせた、安全できめ細やかな採血が行えます

選択ボタンの直感的なタッチ操作で
患者情報や採血記録の登録を迅速に行えます

患者属性必須情報

穿刺情報
患者様の状態の
登録

採取部位の登録

ピクトグラム 直感的に注意事項を把握

視認性の高いピクトグラムを採用 採血時のインシデントを未然に防ぐのに役立ちます
採血カルテ登録内容に注意すべき情報が含まれた場合、次回その患者様の採血時にピクトグラムで判りやすく表示します


採血前に注意する内容



採血時に注意する内容



例 患者取違ひに対するインシデント対策の強化

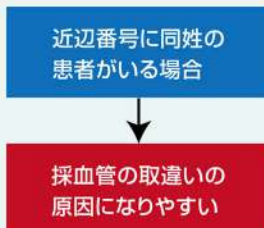


クリア表示 / 写真 重要な確認事項を正確にそしてスムーズに

患者照合確認画面



視覚で認識できる患者照合確認画面で
確実性を向上させスムーズな採血業務が可能になります

採血管照合画面 採血管情報の詳細が確認できます

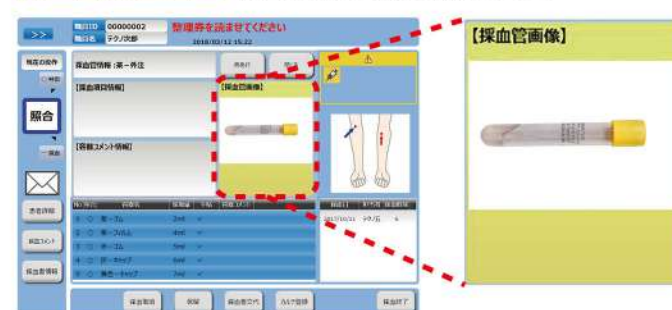

使用される採血管が写真で表示されますので
より確実な照合を実現いたします