



なにもつけずに非接触で測定 いままでにない歩行測定器

病院・デイケア・デイサービス他介護施設向け

RR-AU210

歩容測定ツール

AM Unit

「歩数」・「歩幅」・「歩行速度」などを自動測定
測定時のフットプリントを自動作成

※本製品は、医療機器ではございません


測定項目

ストップウォッチでは計測できない細かな項目を数値として出力

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 「歩数」 | 6. 「重複歩距離」 |
| 2. 「歩行速度」 | 7. 「右重複歩距離」 |
| 3. 「歩幅」 | 8. 「左重複歩距離」 |
| 4. 「右歩幅」 | 9. 「ケイデンス」 |
| 5. 「左歩幅」 | 10. 「フットプリント」 |

フットプリント


足位置と足の軌跡をグラフィカルに表示

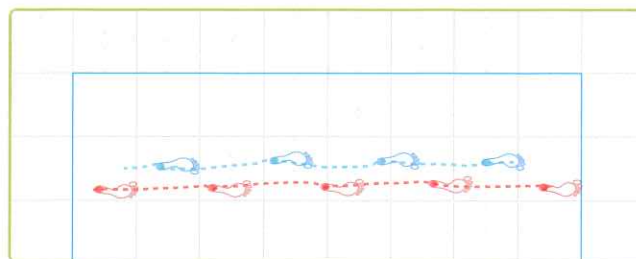

- 青色の足型と点線：左足の足位置と足首の軌跡
- 赤色の足型と点線：右足の足位置と足首の軌跡

自動測定のながれ

待合室や廊下など、施設内のどこへでも持ち運んで測定できます

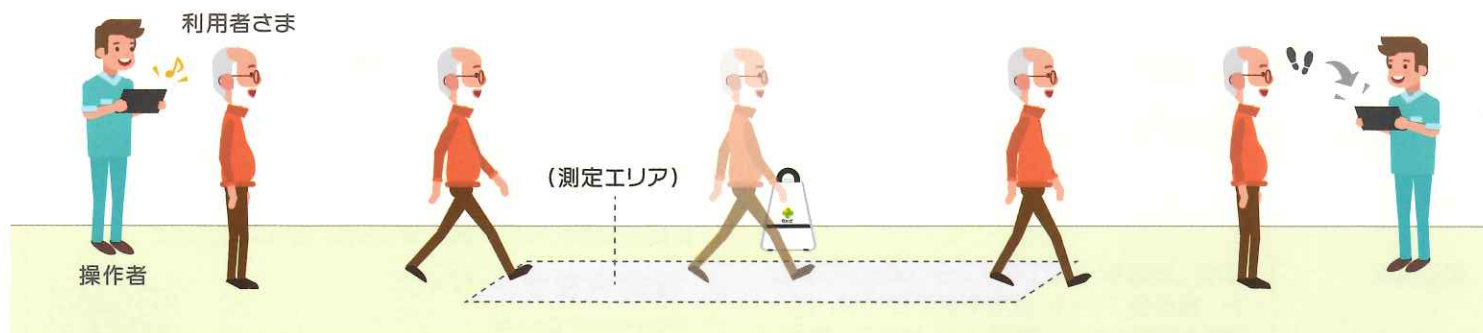

STEP 1. 測定準備

操作者が、操作タブレットをタップする（もしくは、無線リモコンを押す）と測定準備が完了。

STEP 2. 測定開始

利用者さまが測定エリアに入ると、自動で測定が開始されます。

STEP 3. 測定中

測定エリア内での歩行を測定します。
※ 測定中は、測定エリアに利用者さま以外の方は進入しないでください

STEP 4. 測定終了

利用者さまが測定エリアから出ると、自動で測定が終了します。

STEP 5. 結果表示

操作タブレットに結果が表示されるので、その場ですぐに結果をフィードバックすることができます。

✓ 歩行テスト結果画面

歩行テスト結果画面では、前回値との差分比較と、「歩行速度」と「歩幅」の目標値に対する履歴のグラフ表示にあわせ、結果表や評価表といったレポートの表示や、フットプリントを表示します。
測定が終わったら、すぐに利用者様へフィードバックが行えます。



✓ レポート①（結果表）

結果表では、直近の測定を含む過去4回の測定値の履歴と、直近2回の測定値の差分を、数値とアイコン※1でわかりやすく表示します。

※測定値の比較となりますので、結果の良し悪しを判定しているものではありません。


項目	前回値	今回値	差分
歩行速度 (歩/分)	45.2	45.2	0.00
歩幅 (cm)	65.2	65.2	0.00
歩行速度の目標値 (歩/分)	45.2	45.2	0.00
歩幅の目標値 (cm)	65.2	65.2	0.00
歩行速度の差分 (歩/分)	0.00	0.00	0.00
歩幅の差分 (cm)	0.00	0.00	0.00
歩行速度の目標値の差分 (歩/分)	0.00	0.00	0.00
歩幅の目標値の差分 (cm)	0.00	0.00	0.00
歩行速度の目標値の差分の差分 (歩/分)	0.00	0.00	0.00
歩幅の目標値の差分の差分 (cm)	0.00	0.00	0.00

✓ レポート②（評価表）

評価表では、「歩行速度のバロメータ表示※1」、「達成率のランク表示※2」、「直近の測定のフットプリント」および、「直近の測定を含む過去4回の履歴と、直近2回の測定値の比較」を表示します。

※1 歩行速度の出力範囲を6等分した目盛り表示となります。

※2 目標値に対する達成率を、「S」～「D」の5つのランクにわけます。

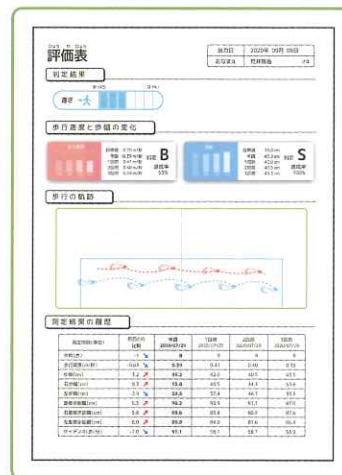

製品仕様

主な機能	歩行測定機能、フットプリント表示、測定結果および各種レポート閲覧・印刷、測定履歴管理、利用者管理、CSVファイル出力
接続方式	無線 (Wi-Fi) または有線 (Ethernet)
電源	AC100V
本体寸法	W 310 x D 240 x H 520 (約mm)
本体重量	約3.5kg
製品構成	本体、本体専用ACアダプタ、操作タブレット、操作タブレット専用電源アダプタ、有線LANアダプタ、専用ソフトウェア、無線リモコン、LANケーブル (3m)、取扱説明書

注意事項

- こちらの製品は、屋内専用となります。
- 製品の特性上、利用者さまの衣服の種類によって（非常にゆったりとしたズボンやロングスカート等、足首の形状が目視で判断しにくいものは、測定に支障が出る場合がございます。予め、ご了承ください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

取扱販売店

- 製品に関する仕様や、ご購入に関するお問い合わせはこちらまで

株式会社サン・ワイズ

SUN-WISE Co.,Ltd

URL : <http://www.sunwise.co.jp>

担当:大井 稔 ooi minoru

HP:090(5410)5873 E-mail: ooi@sunwise.co.jp

